

Spécification

Modèle : JB-018

Tension nominale : 5V-1A

Puissance nominale : 5W

Matériau : ABS

Fiable, sûr, confortable et ergonomique

Norme : GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Problèmes et solutions

Impossible d'allumer la source d'alimentation ?

- la batterie est faible,
- veuillez faire charger la batterie.
- mauvaise connexion de l'adaptateur électrique,
- veuillez le connecter correctement.
- la pile au lithium interne est cassée,
- si vous ne pouvez pas la charger, remplacez-la par une nouvelle.




Masseur oculaire


Manuel d'instruction



Vie lente, vie facile

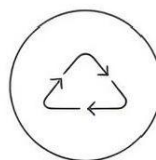

Améliorer la circulation sanguine

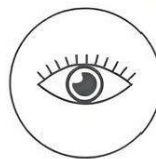

Soulager la fatigue oculaire

Liste des contenus

Merci d'avoir acheté ce masseur oculaire. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser, en particulier les précautions à prendre pour garantir une utilisation correcte. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Brève introduction

Caractéristiques du produit	1
Liste des composants	2
Préparation.....	2
Méthode d'utilisation	3
Précaution.....	4
Spécification	5

Les fonctions du produit sont susceptibles d'être mises à jour ou modifiées sans préavis, veuillez vous référer au produit actuel.



En bref

Principe du produit

Adoptant la technologie de chauffage par infrarouge lointain et de contrôle par micro-ordinateur, ce masseur pour les yeux permet d'augmenter l'oxygène dans les yeux et de drainer les canaux principaux et collatéraux par l'intermédiaire d'un pack chaud, de vibrations et d'une malaxation des yeux. Il améliore la capacité de régulation du cristallin, restaure l'élasticité du muscle ciliaire, améliore la circulation sanguine des yeux, atténue la pression visuelle, soulage la fatigue oculaire, réduit la déficience visuelle et préserve ainsi la santé des yeux. La configuration de ce produit comprend de la musique relaxante, des ondes cérébrales et de la musique naturelle.

Domaine d'application

Ce produit a un effet de massage auxiliaire sur la pseudomyopie, la myopie peu profonde et l'amblyopie. Il permet également de soulager la fatigue oculaire et de prévenir la myopie. Il convient aux étudiants de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire, aux myopes et aux hypermétropes, aux personnes qui utilisent trop leurs yeux, aux opérateurs informatiques, aux comptables, aux concepteurs, aux secrétaires, aux enseignants, aux personnes qui utilisent leurs yeux depuis longtemps, aux neurasthéniques, aux insomniaques et aux personnes âgées dont les yeux sont inconfortables.

Faites du SPA pour les yeux à tout moment

Une bonne aide pour le soin des yeux



Personne de nuit




Porteur de lunettes



Utilisateur d'ordinateur

Disposition des touches

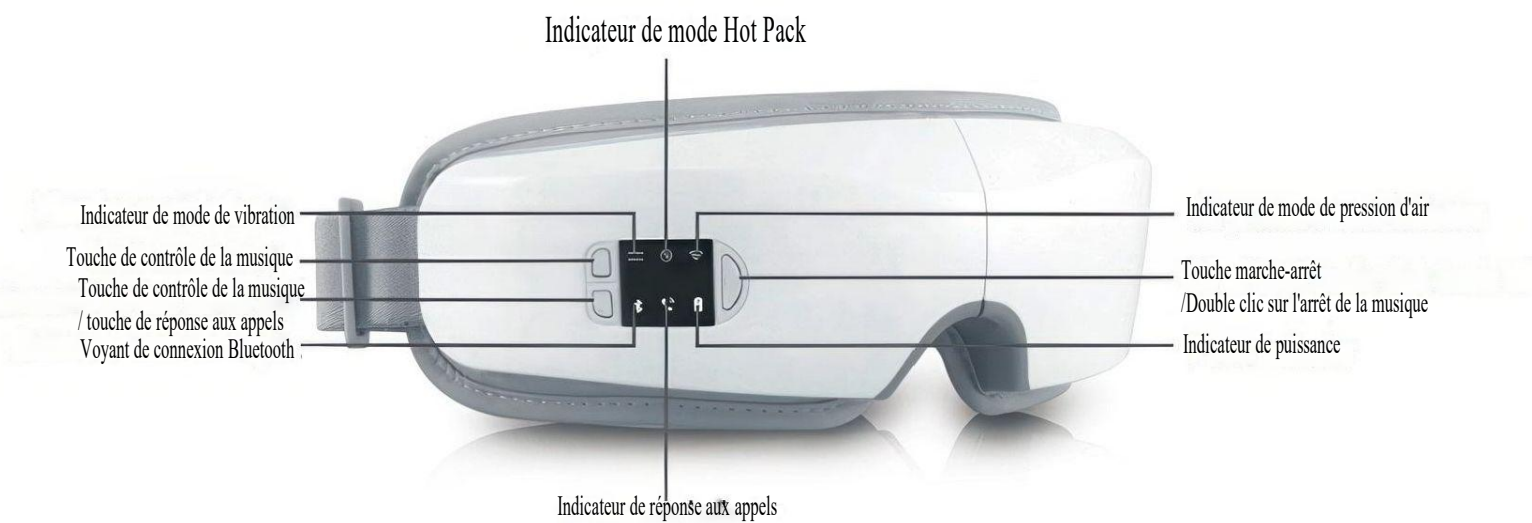

Méthode d'utilisation

Appuyez sur l'interrupteur pendant 2 secondes pour mettre l'appareil en marche. Le mode par défaut est automatique.

Lorsque vous appuyez brièvement sur la touche, celle-ci passe au mode suivant. Le mode de massage est activé à tour de rôle. Appuyer sur le bouton pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

Le cycle des modes est contrôlé par un seul bouton :



La durée de fonctionnement par défaut de l'appareil est de 15 minutes après sa mise en marche. Si vous souhaitez prolonger la durée d'utilisation, vous devez rallumer l'appareil (il est recommandé que la durée d'utilisation ne dépasse pas 15 minutes à chaque fois)

Touche de contrôle de la musique

Appuyez longuement sur cette touche pour augmenter le volume et le son. Appuyez brièvement sur cette touche pour passer à la musique suivante.

Touche de contrôle de la musique

appuyez longuement sur cette touche pour contrôler le volume et le son. Appuyez brièvement sur cette touche pour revenir à la musique précédente.

Connexion Bluetooth

Active le Bluetooth du téléphone mobile, recherche des appareils Bluetooth et se connecte par paires.

Touche de réponse aux appels

Connectez le bluetooth, appuyez sur cette touche lorsque l'appel arrive pour répondre.

Précaution d'emploi

Veillez lire attentivement et comprendre tout le contenu du manuel. Veuillez utiliser l'appareil conformément au manuel d'utilisation

1. Il est interdit d'utiliser l'appareil pour les patients souffrant de maladies oculaires, telles que la chirurgie oculaire, le glaucome, la cataracte, le décollement de la rétine, etc.

2. Les patients souffrant d'accidents vasculaires cérébraux profonds, d'hypertension artérielle et d'hypotension doivent consulter un médecin professionnel. Si vous ressentez une gêne pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement.

3. Les personnes dont les actions sont très lentes, qui souffrent de malaises physiques et mentaux ou qui sont handicapées mentales doivent utiliser l'appareil avec précaution. Veuillez l'utiliser sous la supervision d'un soignant. En cas de gêne pendant l'utilisation, cessez immédiatement de l'utiliser.

4. Évitez d'utiliser les masseurs oculaires après avoir consommé de l'alcool.

5. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de lentilles de contact dans les yeux lorsque vous utilisez le masseur oculaire.

6. N'utilisez pas ce produit dans un environnement où la température est supérieure à 40 °C et où l'humidité est excessive.

7. Il est interdit de laver le produit avec de l'eau. Utilisez un chiffon en coton imbibé d'alcool pour le nettoyer.

8. Ne pas démonter ou tenter de réparer l'appareil soi-même.

Caractéristiques du produit

Ce produit est un massEUR oculaire composé de haute technologie qui utilise la technologie de contrôle de la puce informatique pour effectuer le contrôle de simulation de l'humanité. Le produit adopte un corps chauffant infrarouge de haute technologie qui présente les caractéristiques suivantes : chauffage uniforme, faible consommation d'énergie, densité élevée d'infrarouges lointains et poids léger. Les rayons infrarouges peuvent activer les cellules irradiées, faire résonner les molécules, augmenter la force intermoléculaire, renforcer la capacité de régénération des tissus, améliorer l'immunité, augmenter l'oxygène et draguer les collatéraux, et obtenir un effet sur la santé.

Fonction des points d'acupuncture

Ce produit applique avec succès le nouveau concept de pression d'air aux soins de santé oculaire, ce qui rend le produit plus humain. Sous le contrôle du micro-ordinateur, la pression de l'air peut pétrir les yeux de manière globale, soulager la pression sur les yeux, soulager complètement la fatigue oculaire, restaurer la capacité de contraction du muscle ciliaire, réguler l'élasticité physiologique du muscle ciliaire et soulager l'élongation ou l'atrophie de l'axe de l'œil. Ce produit utilise le champ magnétique tridimensionnel intégré et le mouvement en coupant la ligne de champ magnétique des principaux acupoints du visage et des capillaires périoculaires, de manière à générer un micro-fluide électrique à l'intérieur des capillaires pour activer les méridiens et les collatéraux et harmoniser le Qi et le sang.



Liste des composants


1. Corps du massEUR
2. Câble de données USB (pour le chargement)
3. Boîte de couleurs
4. Manuel d'utilisation
5. Certificat de qualification



Fonctionnement du produit

Préparation

1. Allumez l'appareil pour vérifier si la puissance du masseur est suffisante
2. Si la puissance est insuffisante, veuillez utiliser l'alimentation stable DC5V configurée par notre société pour charger l'appareil jusqu'à ce que la puissance soit suffisante

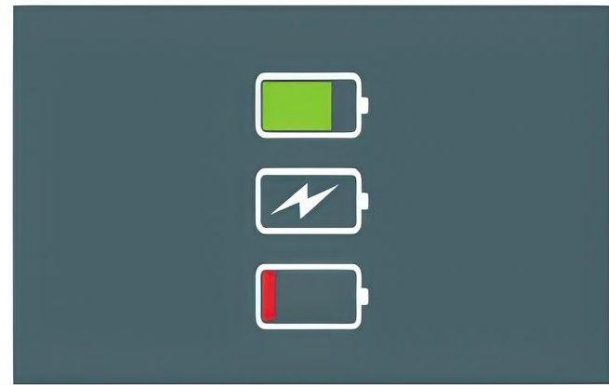

Chargement

1. Trouvez le port de charge sur le côté gauche du masseur
2. Insérez la fiche de sortie de la ligne de charge USB dans la prise de charge du produit, puis connectez l'extrémité USB à l'adaptateur de charge du téléphone portable domestique.
3. Pendant le processus de charge, le voyant rouge de charge est toujours allumé, et le voyant rouge s'éteint une fois la charge terminée (le voyant bleu s'allume une fois la charge terminée pour le modèle vocal).
4. Pendant la charge, l'appareil ne peut pas fonctionner (fonction d'autoprotection, arrêt automatique de l'appareil pendant la charge).
5. Chargez pendant 3 heures.

Vie lente, vie facile